

Agulha Angiográfica - Instrução de Uso

Registro: 10256400045

A Agulha de Punção Angiográfica é indicada para puncionar as veias para introduzir dispositivos de acesso vascular.

Punção de veias para passagem de dispositivos médicos tais como: cateteres, introdutores e fios guias.

A agulha incorpora um conector luer lock padrão para visualização imediata da saída de sangue e é colorido para identificação do calibre.

PREPARAÇÃO

1) Verifique a integridade do pacote e se o produto está no período de validade antes de usar.

OPERAÇÕES

1) Deve-se utilizar uma técnica asséptica para abertura da embalagem e também durante o manuseio do produto.

2) A área a ser perfurada pela agulha deve ser limpa e desinfetada utilizando-se álcool iodado.

3) Preencher uma seringa com soro fisiológico estéril e retirar todo o ar/bolhas da seringa, ligar a seringa na agulha angiográfica.

4) Verificar a pulsação do vaso (veia ou artéria) a ser acessado e introduzir a agulha em um ângulo de 45°.

5) A visualização imediata da saída de sangue através do conector luer lock confirma a penetração no vaso desejado.

6) Avançar o fio guia através da agulha.

7) Remover a agulha e manter o fio guia no local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	Diâmetro externo (mm/G)	Comprimento	Compatibilidade
SN03	1.20 mm/18G	70 mm c/ asa	Fio guia de 0,038"
SN03A	1.20 mm/18G	70 mm s/ asas	Fio guia de 0,038"
SN06	0.80 mm/21G	45 mm s/ asas	Fio guia de 0,021"
SN07	1.20 mm/18G	70 mm c/ asas	Fio guia de 0,038"

PRECAUÇÕES

1) Todas as agulhas devem ser manipuladas com cuidado.

2) Leia e observe atentamente todas as instruções antes da utilização.

3) Manusear o produto em campo estéril e utilizar técnicas assépticas.

4) Recomenda-se cautela e aderência aos métodos universais de precaução de forma a evitar lesões inadvertidas por punção da agulha.

5) Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com a técnica.

6) Este produto destina-se a uma única utilização. PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

7) Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

8) Não utilizar após expirar a data de validade - Validade: 03 anos.

9) Não modifique este dispositivo.

10) Antes da utilização, as agulhas devem ser examinadas cuidadosamente a fim de detectar a presença de possíveis defeitos.

O exame deve procurar por curvas, torções ou outros danos.

11) Manuseie e elimine em conformidade com práticas médicas aceitas e com normas aplicáveis.

12) Após a utilização, este produto constitui um risco biológico potencial.

13) Os materiais perfurocortantes devem ser descartados conforme legislação vigente.

EFEITOS ADVERSOS

1) Hematoma no local de acesso.

2) Hemorragia.

3) Reação pirogênica.

4) Sepse / Infecção.

5) Inflamação no local da inserção.

6) Febre.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido longe do sol e chuva e em ambiente seco e limpo com temperatura de 10°C a 60°C.

	Esterilizado por óxido de etileno
	Atenção - consultar instruções de uso
	Lote
	Data de Fabricação
	Data de Validade
	Referência

FABRICANTE

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., LTD
Address: No. 925, Jinyuan Yi Road, Shanghai, China.
Zip code: 201803
Tel: +86-021-59140056 | Fax: +86-021-69000013

DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR EXCLUSIVO

Biomedical Prod. Científicos Médicos Hospitalares SA
CNPJ: 19.848.316/0001-66
Av. Dr. Álvaro Camargos, 1.236, São João Batista
Belo Horizonte/MG - CEP: 31515-232
Tel. (31) 2129-4000 / Fax: (31) 2129-4040
Resp. Técnico: Carolina de Andrade
CRBio MG: 098367/04D


BIOMEDICAL
www.biomedical.com.br