

Extensor de Alta Pressão - Instrução de Uso

Registro: 10256400048

O extensor de pressão é um acessório utilizado para conduzir fluidos dos procedimentos de angiografia, angioplastia, radiologia, anestesia e em terapia intensiva. O produto é indicado para condução de fluidos onde se requer segurança na injeção de fluidos sob alta pressão.

MODO DE USO

Empregar a técnica asséptica durante a remoção da embalagem e durante o uso. Em um campo estéril e com vestimenta de segurança recomendada, unir a extremidade com conexão fêmea do extensor ao acessório de injetor de fluidos (ex. seringa) e posteriormente, completar o lúmen interno do extensor com o fluido desejado, para a completa e total retirada do ar, e então, acoplar a conexão macho no produto desejado (ex. cateter angiográfico).

Observar que não exista a presença de bolhas, tanto no acessório injetor quanto no extensor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	TIPO (CM)	DESCRIÇÃO
PMT0101	30	Macho-fêmea Luer Lock
PMT0102	60	Macho-fêmea Luer Lock
PMT0103	90	Macho-fêmea Luer Lock
PMT0104	120	Macho-fêmea Luer Lock
PMT0105	150	Macho-fêmea Luer Lock
PMT0106	180	Macho-fêmea Luer Lock
PMT0501	30	Adaptador Rotativo
PMT0502	60	Adaptador Rotativo
PMT0503	90	Adaptador Rotativo
PMT0504	120	Adaptador Rotativo
PMT0505	150	Adaptador Rotativo
PMT0509	180	Adaptador Rotativo

PRECAUÇÕES

- 1) Antes de usar, leia atentamente o rótulo. Não aplique mais pressão do que a pressão indicada no rótulo.
- 2) Lave todos os componentes com soro fisiológico e inspecione a embalagem em casos de danos durante o transporte.
- 3) O dispositivo é apenas para uso único, não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar.
- 4) Não use além do dia da expiração.
- 5) Não altere a estrutura do produto durante o procedimento.

ADVERTÊNCIAS

Ao aplicar pressão no tubo de alta pressão, verifique todas as conexões em caso de vazamento. Pare de usar e substitua o dispositivo se houver vazamento.

EFEITOS ADVERSOS. Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES. Não se aplica.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido ao abrigo de luminosidade direta com temperatura de 10°C a 40°C.

	Esterilizado por óxido de etileno
	Proibido reprocessar
	Atenção - consultar instruções de uso
	Lote
	Data de Fabricação
	Data de Validade
	Referência

FABRICANTE

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., LTD
Address: No. 925, Jinyuan Yi Road, Shanghai, China.
Zip code: 201803
Tel: +86-021-59140056 | Fax: +86-021-69000013

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Biomedical Prod. Científicos Médicos Hospitalares SA
CNPJ: 19.848.316/0001-66
Av. Dr. Álvaro Camargos, 1.236, São João Batista
Belo Horizonte/MG - CEP.: 31515-232
Tel. (31) 2129-4000 / Fax: (31) 2129-4040
Resp. Técnico: Carolina de Andrade
CRBio MG: 098367/04D