

Instrução de Uso - Manifolds Dispositivo de Múltipla Entrada

É um produto que se conecta em tubos, cateteres e outros materiais e pode ser manipulado para direcionar o fluxo de várias soluções ao sistema vascular do paciente durante o procedimento clínico.

As torneiras dos manifolds são marcadas com setas proeminentes que indicam o sentido do fluxo. As torneiras são de fácil rotação, mas tem força suficiente para prevenir um movimento inadvertido. O adaptador rotativo frontal (saída) é conectado ao cateter angiográfico, ao cateter guia de angioplastia, ao de termodiluição ou outro que venha a ser utilizado para administração de fluídos ou monitoramento de pressão com resistência máxima de até 500 PSI de pressão.

Modo de Uso

- 1) Remover o dispositivo da embalagem.
- 2) Assegure-se de que todas as linhas estejam firmemente conectadas às portas laterais do distribuidor.
- 3) Conecte firmemente a linha de fonte do contraste às portas laterais do distribuidor; Ligar os conectores machos dos extensores de fluidos a administrar no paciente e/ou de monitoramento de pressão nas saídas fêmeas verticais do Manifold.
- 4) Conectar uma seringa com ponta macho ao fechamento do luer na extremidade proximal (fechamento fêmea do luer) do Manifold; Conectar uma seringa angiográfica e/ou radiológica na saída fêmea com soro fisiológico para completar o lúmen interno do Manifold.
- 5) Verifique os conectores, o corpo múltiplo e os trajetos dos fluidos para ver se há bolhas de ar; se houver proceder à retirada das bolhas.
- 6) Se um sistema pressurizado do contraste for usado (300mmHg) a válvula de verificação permitirá o preenchimento automático da seringa de controle simples pela aspiração do volume (ml) desejado.

Especificações Técnicas

Código	Descrição
AM0201	2 portas, direita, ON, 500 psi
AM0301	3 portas, direita, ON, 500 psi
AM307	3 portas, esquerda, ON, 500 psi
AM0401	4 portas, direita, ON, 500 psi
AM0202	2 portas, direita, Off, 500 psi
AM0302	3 portas, direita, Off, 500 psi
AM0308	3 portas, esquerda, Off, 500 psi
AM0402	4 portas, direita, Off, 500 psi
AM0209	2 portas, direita, ON, 500 psi, alça macia
AM0309	3 portas, direita, ON, 500 psi, alça macia
AM0210	2 portas, direita, Off, 500 psi, alça macia
AM0310	3 portas, direita, Off, 500 psi, alça macia

Precauções

- 1) Assegure-se de que nenhuma bolha de ar entre dentro do sistema durante a operação.
- 2) Se a embalagem individual estiver danificada, proibir o uso.
- 3) Se o produto estiver vencido, proibir o uso.
- 4) Não altere a estrutura do produto no processo.

Advertências

- 1) Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras ao usar os manifolds para evitar a entrada de ar no conjunto. Use apenas o dedo para apertar todas as conexões. Aperto excessivo pode fazer rachaduras e vazamentos durante a operação.
- 2) Antes de montar outros dispositivos, abra e feche todos os interruptores, um a um, para verificar vazamentos. Substitua o dispositivo se houver vazamentos.

3) A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial de paciente ou usuário. Pode levar à contaminação e/ou comprometimento da capacidade funcional. A contaminação e/ou a funcionalidade limitada do dispositivo podem causar lesões, doenças ou morte do paciente.

4) O tratamento do lixo hospitalar deve estar de acordo com os requisitos das leis e regulamentos locais.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Contraindicações

Não se aplica.

Armazenamento

O produto deve ser mantido ao abrigo de luminosidade direta com temperatura de 10°C a 40°C.

	Esterilizado por óxido de etileno
	Fabricante recomenda uso único.
	Atenção - consultar instruções de uso
	Lote
	Data de Fabricação
	Data de Validade
REF	Referência

Fabricante

KDL - Shanghai Kindly Medical Instruments Co., LTD
925, Jinyuan Yi Road, Shanghai, China.
Zip code: 201803
Tel: +86-021-59140056 Fax: +86-021-69000013

Importador e Distribuidor Exclusivo

Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares SA
CNPJ: 19.848.316/0001-66
Rua: Dr. Álvaro Camargos, 1236 - CEP: 31515-232
Belo Horizonte / MG
Tel: (31) 2129-4000 / Fax: (31) 2129-4040
Resp. Técnico: Carolina de Andrade Gomes – CRBio MG: 098367/04D