

Cateter Diagnóstico Angiográfico - Instrução de Uso

Registro: 10256400054

Os cateteres angiográficos são projetados para serem utilizados na administração de meio radiopaco em locais selecionados no sistema vascular em conjunto com procedimentos de diagnóstico de rotina. Os cateteres angiográficos com faixas de marcação podem também ser usados para medições anatômicas. Os vasos de acessos dos cateteres angiográficos são as artérias femorais e os mesmos podem alcançar as seguintes artérias periféricas: femorais, poplíteas, ilíacas, renais, mesentérica superior e tronco celiaco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência	French	Comp.	Diâmetro Interno	Fio Guia Recomendado	Tipo
ACSON14F0100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Bentson 1
ACH14F0100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Headhunter 1
ACSIM14F0100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Simmons 1
ACSIM24F0100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Simmons 2
ACMPA14F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Multipurpose A1
ACMPA24F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Multipurpose A2
ACBERENSTEIN4F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Barenstein
ACH14F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Headhunter 1
ACH34F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Headhunter 3
ACSIM14F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Simmons 1
ACSIM24F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Simmons 2
ACSIM34F1100	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Simmons 3
ACMPB224F1100H2	4F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Multipurpose B2
ACCOBRA14F0065	4F	65 cm	0.042 (1.07 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Cobra 1
ACCOBRA14F0065H2	4F	65 cm	0.042 (1.07 mm)	0.035 (0.89 mm)	2 Side Ports Cobra 1
ACCOBRA24F0065H2	4F	65 cm	0.042 (1.07 mm)	0.035 (0.89 mm)	2 Side Ports Cobra 2
ACRENALCURVADUPLA4F0065H2	4F	65 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Renal Double curve
ACCOBRA14F1065	4F	65 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Cobra 1
ACCOBRA24F1065	4F	65 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Cobra 2
ACCOBRA34F1065	4F	65 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Cobra 3
ACMIKAELSSON4F1080	4F	80 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Mikaelsson
ACDVS14F1100	5F	100 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports DVS A1
ACBERENSTEIN5F100	5F	100 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Barenstein
ACSON15F0100	5F	100 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Bentson 1
ACSON25F0100	5F	100 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Bentson 2
ACH15F0100	5F	100 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Headhunter 1
ACH15F1100	5F	100 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Headhunter 1
ACH35F0100	5F	100 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Headhunter 3
ACSIM35F0100	5F	100 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Simmons 3
ACSTRAIGHT5F1100	5F	110 cm	0.042 (1.07 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Straight Selective
ACRENALCURVADUPLA5F0065	5F	65 cm	0.044 (1.12 mm)	0.035 (0.89 mm)	3 Side Ports Renal Double curve
ACBERENSTEIN5F0065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Barenstein
ACCOBRA15F0065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Cobra 1
ACCOBRA25F0065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Cobra 2
ACCOBRA35F0065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Cobra 3
ACHOOK085F0065H2	4F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Hook 0.8
ACRENALCURVADUPLA5F1065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Renal Double Curve
ACSIM25F0065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	0 Side Ports Simmons 2
ACCOBRA15F0065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	2 Side Ports Cobra 1
ACCOBRA25F0065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	2 Side Ports Cobra 2
ACCOBRA35F0065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	2 Side Ports Cobra 3
ACRENALCURVADUPLA5F0065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	2 Side Ports Renal Double Curve
ACHOOKS105F0065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.035 (0.89 mm)	2 Side Ports Shepherd Hook 0.8
ACCOBRA15F1065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Cobra 1
ACCOBRA15F1065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Cobra 2
ACCOBRA25F1065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Cobra 2
ACCOBRA35F1065	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Cobra 3
ACHOOK105F0065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Hook 1.0
ACRENALCURVADUPLA5F1065H2	5F	65 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Renal Double Curve
ACMIKAELSSON5F1080	5F	80 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Mikaelsson
ACMPB25F1080	5F	80 cm	0.046 (1.17 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Multipurpose B2
ACFLR5F0090H10	5F	90 cm	0.052 (1.32 mm)	0.035 (0.89 mm)	10 Side Ports Straight Flush
ACMPA16F1100	6F	100 cm	0.054 (1.37 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Multipurpose A1
ACMPA26F1125	6F	125 cm	0.054 (1.37 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Multipurpose A2
ACMPA16F1125	6F	125 cm	0.054 (1.37 mm)	0.038 (0.97 mm)	0 Side Ports Multipurpose A1
ACMPA26F1100	6F	100 cm	0.054 (1.37 mm)	0.038 (0.97 mm)	2 Side Ports Multipurpose A2

INSTRUÇÃO DE USO

Um fio guia revestido é recomendado para uso com os cateteres angiográficos. Introduza o cateter no vaso sanguíneo utilizando uma técnica de entrada vascular de escolha.

Marcas Radiopacas. Precisão de medição anatômica é $\pm 4\%$.

PRECAUÇÕES

- 1) Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- 2) Não use após a data de validade.
- 3) Não autoclavar.
- 4) Retire cuidadosamente o cateter da embalagem segurando o hub e retirando-o lentamente da embalagem.
- 5) Se a resistência for sentida ao remover o fio-guia do cateter, remova o fio-guia e o cateter juntos para evitar possíveis danos à parede do vaso.
- 6) Faça o flush (molhar) de todos os dispositivos que entram em um vaso sanguíneo com solução salina heparinizada estéril ou solução isotônica similar antes do uso.
- 7) Para cateteres contendo revestimento de polímero hidrofílico na superfície distal do cateter, a superfície da porção distal do cateter deve estar completamente molhada com solução para permanecer lubrificada. Deve-se tomar precauções adequadas para molhar o cateter antes e durante o uso.

ADVERTÊNCIAS

- 1) Os cateteres angiográficos são de uso único.
- 2) Tamanho recomendado do fio guia: veja a etiqueta do cateter individualmente.
- 3) O uso do fio guia foi associado a maior incidência de formação de trombo.

EFEITOS ADVERSOS

Os cateteres angiográficos devem ser utilizados por médicos familiarizados com a introdução do cateter percutâneo. As complicações que podem estar associadas ao uso de cateteres angiográficos incluem, entre outras, as seguintes:

- Formação de trombos/êmbolos
- Embolia do ar/Hematoma no local da punção
- Dano da parede arterial
- Destruição da placa
- Infarto do miocárdio
- Arritmias cardíacas
- Infecção
- Perfuração da parede vascular
- Reação alérgica reação ao meio de contraste
- Oclusão vascular
- Espasmo vascular
- Acidente vascular cerebral e morte.

CONTRAINDICAÇÕES

Os cateteres angiográficos não são indicados para acesso e alcance no sistema circulatório central.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em condições limpas e secas, longe da luz solar com temperatura de 10°C a 60°C.

STERILIZADO	Esterilizado por óxido de etileno
	Proibido Reprocessar
	Atenção - consultar instruções de uso
	Lote
	Data de Fabricação
	Data de Validade
	Referência

FABRICANTE

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., LTD
Address: No. 925, Jinyuan Yi Road, Shanghai, China.
Zip code: 201803
Tel: +86-021-59140056 | Fax: +86-021-69000013

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Biomedical Prod. Científicos Médicos Hospitalares SA
CNPJ: 19.848.316/0001-66
Av. Dr. Álvaro Camargos, 1.236, São João Batista
Belo Horizonte/MG - CEP: 31515-232
Tel. (31) 2129-4000 / Fax: (31) 2129-4040
Resp. Técnico: Carolina de Andrade Gomes
CRBio MG: 098367/04D